

# 新型コロナウイルス IgM /IgG 抗体検査キット取扱説明書


## ○本製品の特徴

研究用試薬 本製品は体外診断用医薬品承認は取得しておりません。

- IgM と IgG 併用でより確度の高い検査ができます。
- 全血・血清・血漿を使用できます。
- CE 認証取得済み
- 10-15 分で検査できます。
- 高温多湿直射日光を避けて保管
- 世界 120 カ国で数億テストの販売実績


## ○使用方法

### ✦毛細血管全血使用時

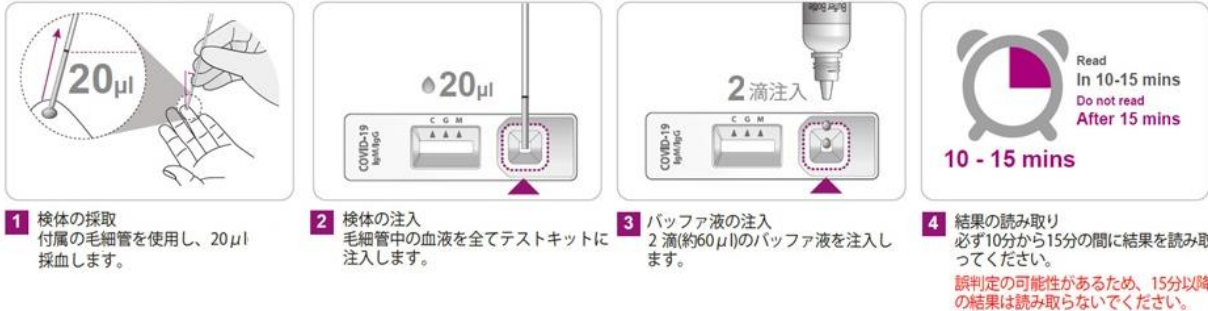

※スポイトの使用任意です。血液が少ない時にスポイトを使用した場合、スポイトから血液が出ない場合がございます。その場合は上記 1 の手順をなくし、2 の手順の代わりに指の上に 2.5 mm 程度の球状の血液を用意し、指を直接検査キットの注入口にかざして血液を注入してください。

## ○検査結果

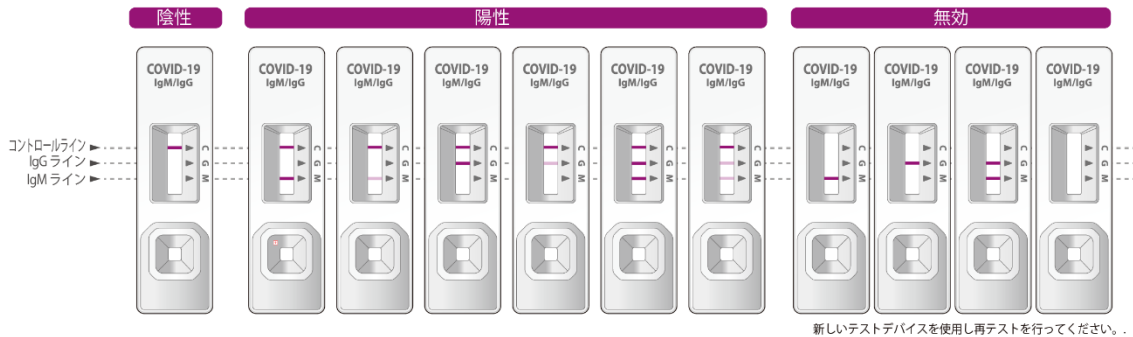

## ○ランセット使用方法



## ○注意事項

抗体検査の結果は、COVID-19 感染の診断や治療の根拠として使用しないでください。

臨床的なご質問についてはお答えしかねます。

実際の製品とイラストは異なる場合がございます。