



レンズのつけ方

① 指先にレンズをのせる。

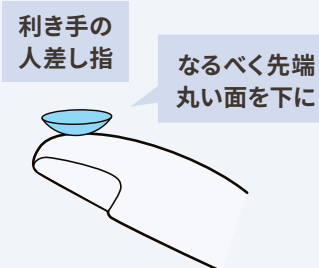

② 両手でまぶたを開いてレンズを黒目にそっとのせる。

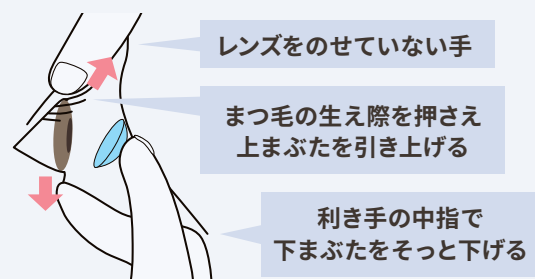

③ 反対側の目を隠し見え方を確認する。




片手ではずす方法


① 大きく目を開ける。



② 目じりをひっぱり軽くまばたきする

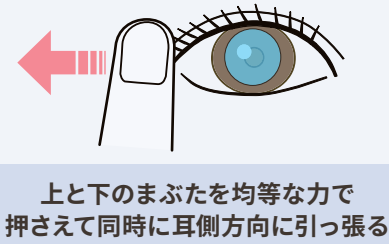

③ 手のひらで受け止める。


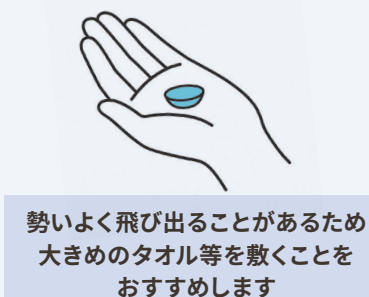


両手ではずす方法

① 上下のまぶたを軽く押さえる。




② 下まぶたのふちですくいあげるようにする。

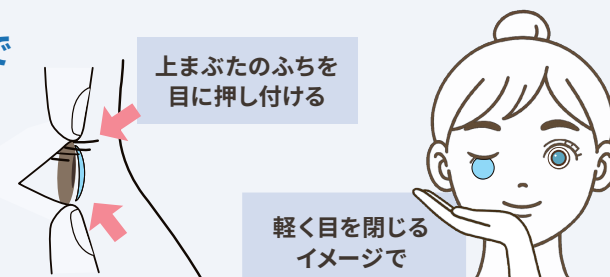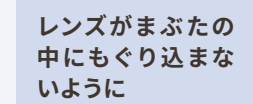

スポイトではずす方法


鏡でレンズが黒目に装着されていることを必ず確認してからご使用ください。

① レンズにスポイトをつける。

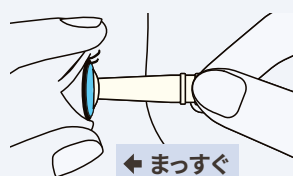


② レンズをはずす。

やや下方に引くようにゆっくりはずします。

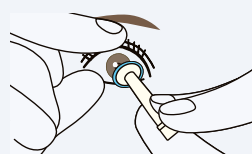

③ スポイトからレンズをはずす。

スポイトを軽くねじるようにしてはずします。

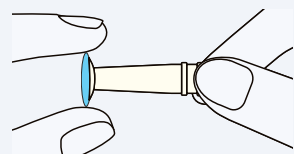

使用上の注意

- ・使用後は洗って自然乾燥
- ・吸着が弱くなった場合は新しいものと交換
- ・スポイトで目を直接触らない

レンズがズレた時


① ずれた方向と反対側に手鏡を移動させて、視線で追います。



② まぶたの上からレンズのふちを押さえる。



③ レンズが動かないように固定して、手鏡を正面に戻す。

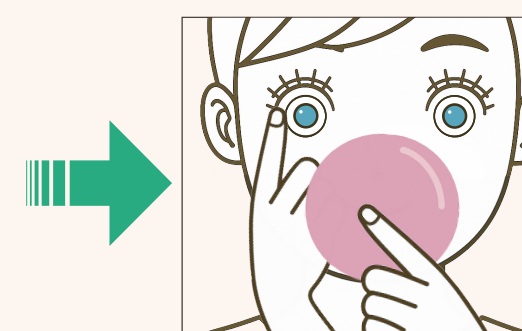

手鏡を戻す時はまばたきをしない



レンズの取扱い方法
動画で手順をチェック



装用ガイド
詳しい説明書(PDF)




装脱ガイド



CUDマークはNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、認証された印刷物、製品等に表示できるマークです。


ケアの流れ レンズをつける時

- ① せっけんで手をきれいに洗う。
- ② レンズクリップにレンズを入れたまま、水道水ですすぐ。
約10秒
- ③ レンズクリップからレンズをはずし、装用する。

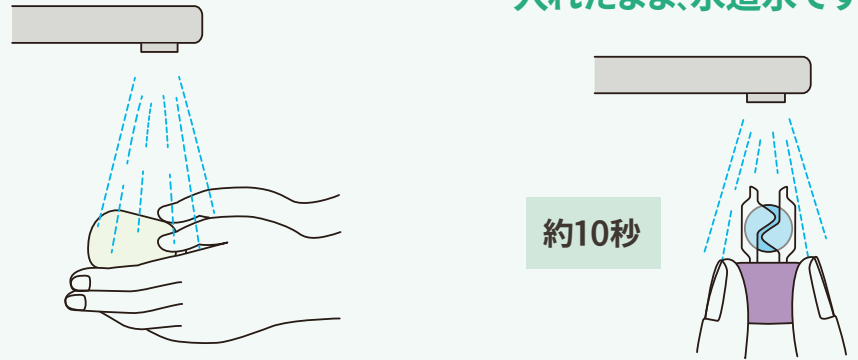

レンズをつけた後

- ④ レンズ保存ケースを水道水でよくすすぐ。
- ⑤ ペーパータオルが清潔なタオルの上におく。
乾燥させる

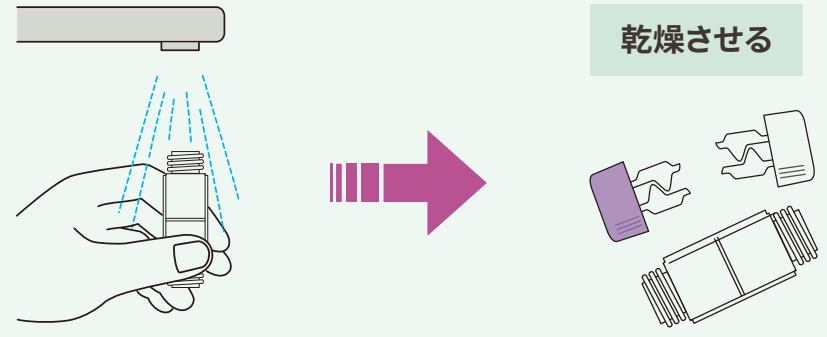

ケアの流れ はずした後

- ① せっけんで手をきれいに洗う。
- ② 目からはずしたレンズは洗浄液を使って外面を丁寧にこすり洗いする。
丸い面を下
- ③ 人さし指で内面の汚れをかき出すようにして洗う。
- ④ レンズクリップにレンズを入れ、水道水でよくすすぐ。
約10秒




- ⑤ レンズ保存ケースに洗浄保存液を入れ、キャップをしっかりとめてレンズを保存する。
- ⑥ レンズ全体が充分浸かっていることを確かめ、保存する。
4時間以上保存




装用について 終日装用

起きている間に装用し、寝る前に必ずはずしてください。

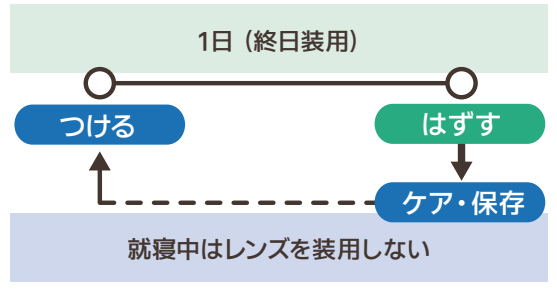

装用スケジュール

眼科医の指示に従い、短時間から始め、その後少しずつ時間を延長してください。

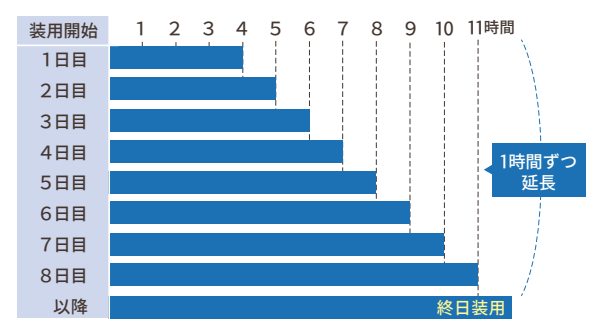

装用を中断した場合

短時間から装用を再開してください。
1か月以上装用を中断し再開の場合は眼科医に相談してください。

定期検査

コンタクトレンズに慣れてからは3か月に1回が定期検査の目安となります。
実際のスケジュールは眼科医の指示に従ってください。

