

ダチョウ抗体 新型コロナウイルス可視化キット



品名: 新型コロナウイルス可視化キット

販売価格: 3,800円(税別)

①パッケージ(中ゲス仕様)

幅191mm・高さ103mm・奥行き27.5mm

②可視化シート(10枚)

幅130mm・高さ90mm

③可視化液30mLボトル(1本)

直径26mm・高さ96mm

外箱:48個入り/幅395mm・高さ229mm・奥行き395mm

日本製

アルコールスプレーおよびブラックライトは別売り

使用期限:製造から12ヶ月

〈発売元〉株式会社ジールバイオテック 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-13

〈総販売元〉V BLOCK販売株式会社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-4-2

ダチョウ抗体 新型コロナウイルス可視化キット

パッケージ裏面記載内容

新型コロナウイルス可視化キット

呼気に含まれるウイルスに可視化シート内のダチョウ抗体が吸着、そこに可視化液を反応させることで可視化します。

日本製

本製品は新型コロナウイルスを可視化するキットです

● 使用方法是中敷き裏面に記載しています。

別売

アルコールスプレーおよびブラックライトは別途お買い求めください。

⚠ 本製品は体外診断用医薬品ではありません。

薬機法に基づく体外診断用医薬品の承認は受けておりません

⚠ ご使用になる前に、使用方法や注意事項をよく読んでから正しくお使いください。

注意事項

- 本製品による可視化結果は、SARS-CoV-2感染の確定診断には使用できません。
- 本製品によるSARS-CoV-2感染の診断や治療の目的として使用しないでください。厚生労働省より公表されている最新情報を参照し、臨床症状も含め総合的に判断し医師にご相談ください。

品名: 新型コロナウイルス可視化キット

【キット内容物】

○ 可視化シート(ダチョウ抗体担持フィルター): 10枚 ○ 可視化液(二次抗体溶液検出液): 1本

〈発売元〉株式会社ジールバイオテック 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-13

〈総販売元〉V BLOCK販売株式会社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-4-2

使用上の注意

- 本製品の可視化シートの使用は1枚1回限りです。再使用はしないでください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 開封後は速やかに使用してください。
- 本製品に他の液体を混ぜて使用しないでください。
- 本製品の容器や袋に破損などの異常を認めた場合は使用しないでください。
- 可視化液を垂らす際に他の異物が混ざらないようにご注意ください。
- 本製品使用前に手指の洗浄を行ってください。
- 万一、可視化液が目に入った場合は、水でよく洗い流してください。
- 万一、可視化液を誤飲して気分がすぐれない場合は、医師にご相談ください。
- 本製品を使用して気分が悪くなった場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
- 本製品の検出結果は診断を確定するものではありません。

保管方法・使用期限

- 可視化液は開封後、高温多湿、直射日光を避け2°C~20°Cの冷暗所または冷蔵庫にて保管してください。
- 使用後の検出液は家庭用ゴミとして処分していただけますので、各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 使用期限は製造から12ヶ月です。

製造年月: 2022年4月 使用期限: 製造から12ヶ月

中ゲス裏面記載内容

使用方法

呼気に含まれるウイルスに可視化シート内のダチョウ抗体が吸着、そこに可視化液を反応させることで可視化します。



ご使用になる前に、パッケージ裏面記載の使用方法や注意事項をよく読んでから正しくお使いください。




「可視化シート」をお手持ちのマスクの内側に乗せます。



「可視化シート」を挟んだマスクを約3時間以上つけた状態でいつも通り過ごしてください。




目安の時間が経過したら、マスクから「可視化シート」を取り出し、トレーなどの上に置きます。

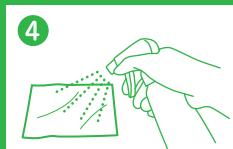

取り外した「可視化シート」をお手持ちのアルコールスプレーで殺菌・除菌します。



殺菌・除菌した「可視化シート」を顔に接していた面を上にして、「可視化液」を「可視化シート」の鼻と口が当たっていたあたりに数滴かけます。

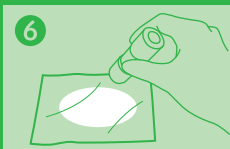

暗所にてお手持ちのブラックライトで「可視化シート」を照らします。

照らした部分にSARS-CoV-2が

- 付着している場合「黄緑色」の部分が現れます
- 付着していない場合「変化なし」