


B-リングノブワックス

PS ring knob wax

「歯科治療中に起きる 技工物（銀歯）の誤飲誤嚥をなくしたい」

という、岡山大学病院医療安全管理部の医療ニーズを受け、
同大学と共同研究を実施し、歯科医師向け
口腔内落下防止リングノブ『PS リングノブワックス』を製品化しました。

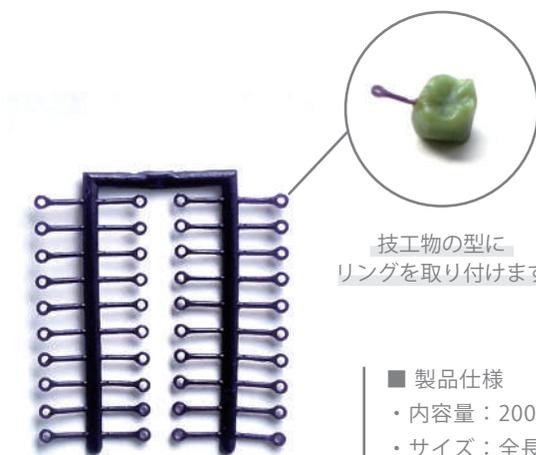

技工物の型に
リングを取り付けます



装着完了後は
リング部をカットします

※ 本製品は医療機器ではありません。
※ 梱包仕様および外観は、改良のため予告なく
変更する場合があります。ご了承ください。

■ 製品仕様

- ・ 内容量：200個入 10g
- ・ サイズ：全長8mm / 個
- ・ 使用期限：開封後1年
- ・ 主成分：炭化水素樹脂、炭化水素ワックス
- ・ 軟化温度：50℃～75℃
- ・ 保管方法：直射日光を避け、
15℃～25℃で保管してください

※ 200個 / ケース



※ 40個 / ツリー

■ セット内容 ※別途送料

- ・ 200個入 ---- 2,500円 (税2,750円)
(1ケース)
- ・ 800個入 ---- 9,000円 (税9,900円)
(4ケース)

■ 使用手順

CASTEM

1 歯型を取る



歯型に石膏を流し込み
歯模型を作る



歯科医院

2 虫歯の歯模型にワックスを取り付け銀歯模型をワックスで製作する

銀歯模型




この時ワックスの
リングを
取り付けておく

※取り付け箇所および穴の向きは
医師とご相談ください。



3 できた銀歯模型に注ぎ口形状のワックスを取り付ける ワックス模型を金属の筒に入れ石膏(耐火材)を注ぐ


耐火材

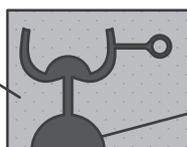


注ぎ口

歯科技工所

4 焼成するとワックス部分が空間になり耐火材が残る そこへ金属を溶かし流し込む

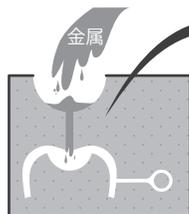


金属

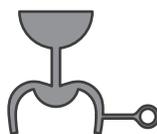

5 冷え固まった銀歯の注ぎ口をカットし、 リング部に糸を通して脱落防止対策をし、実際の歯に取り付けるため微調整を行う




---カット---

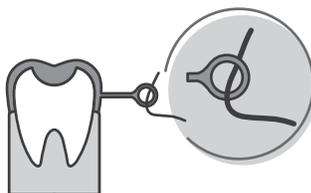

歯科医院

6 銀歯の微調整を終え接着完了後、リング部をカットし完了

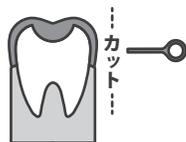

カット



■ 製造販売元

株式会社キャストム

〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原1808-1
TEL: 084-955-2221 FAX: 084-955-2065



■ 販売サイト <https://www.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/>

本製品は医療機器には該当しませんので、
歯科関係者の方々に気軽にご購入いただけるよう、
通販サイトでの販売しております。

