

# Mimamori Station

## みまもりLite

### アプリ取扱説明書 Ver1.0



お使いになる前にならぬお読みください。



## はじめに

- 無料版につきサポートはありません。
- 本アプリは対象者の安全を保証するものではありません。
- 機能・性能をご理解の上、その他の安全対策と併用してください。
- プライバシー保護のため、必ず対象者の同意を取ってご利用ください。
- アプリは、予告なくアップデートや変更・中止する場合があります。

### 【動作環境】

- Android 6.0～7.X ※iOS版はありません。
- メモリーは2GB以上推奨（最低1GB）
- 標準解像度 1280x720
- インカメラと照度センサー
- Bluetooth4.0以上を実装  
※外出タグを利用する場合
- ACアダプターは1A以上

### 【注意】

- 機器は必ず専用機としてお使いください。
- インターネット接続が必要です。
- インカメラがない機種は動き判定不可
- 動き判定は、夜間のヘッドライト等の明るさ変化で反応する事があります。
- カメラ動体検知ではCPUに負荷がかかるため発熱にご注意ください。
- 照度センサー未搭載は結果がゼロ
- 横長で設置して下さい。※縦長は不可

### 【インストール】

- ①はじめに充電を80%以上  
Gmailメールアドレスを取得してください。
- ②Androidのバージョンアップで最新に
- ③不要と思われるアプリを極力削除
- ④常時画面を表示させるための設定  
・設定→セキュリティ→ロック→なし  
※設定→画面→スリープしない  
~~~~~  
※出来ない場合は、  
1.設定→端末情報→ビルド→7回タップ  
確認→開発者になりました！  
2.設定→開発者向けオプション→  
スリープモードにしない→チェック  
~~~~~
- ⑤外出タグを利用する場合  
設定→Bluetooth→ON  
設定→位置情報→ON  
※機種によってはGPSが必要
- ⑥GooglePlayストア「みまもりLite」で検索しインストールしてください。

初期設定時に「動き判定」をONにすると自動的に「OpenCV Manager」をインストールする旨メッセージが出ますので従ってください。

### 【オプション】外出タグ

自動的に外出や帰宅を感知します。

i-Storeで購入 HBM-121GT 8,000円



### 【その他】

有料版の「みまもりステーション」は、クラウド利用し、より多くの機能を詳細に管理出来ます。是非ご検討ください。

- 詳しくは [www.mimamori.jp](http://www.mimamori.jp)

# アプリ画面の説明

- 日付●時刻  
インターネットより自動で取得します。
- ホーム画面  
5分毎にチェックし強制的に、この画面に戻します。
- インカメラ  
動き判定に使用します。
- 設定  
設定と終了を行います。
- 照度センサー  
明るさを計測します。
- 動き判定  
判定の様子を確認
- 伝言  
ワンタッチ伝言を起動します。
- 緊急ボタン  
予め設定された方へ、即時緊急メールします
- 在宅/外出  
在宅/外出を切替えます。
- スタンド  
市販品をご準備ください。
- スマホ・タブレット  
「専用機器」としてご準備ください。
- アナウンス音量  
Androidの設定→音設定（サウンド）→メディア音量で調節してください。

# 設定項目の説明

**基本設定**

- 1. 表示する名前  
みまもり太郎  
●メールに名前を表示します。
- 2. 動き判定  
○使わない◎使う  
低感度← ○1 ○2 ◎3 ○4 ○5 →高感度  
●動き判定の感度を設定します。  
時差画像を比較して一定の変化がある場合に、動きとして判定します。  
※1が鈍感で5が敏感になります。
- 3. メール送信先  
名前: みまもり太郎      メールアドレス: taro@mimamori.jp  
●見守りをする方の名前とメールアドレスです。少なくとも1つは登録してください。  
●設定したメールが送信されるかテストします。  
テスト送信
- 4. 送信メール選択  
前日分レポート(定時送信)  
◎送る ○送らない  
・送信時刻 毎日 7 : 00 頃  
在宅・外出メール(即時送信)  
◎送る ○送らない  
緊急メール(即時送信)  
◎送る ○送らない  
伝言メール(即時送信)  
◎送る ○送らない  
●メール送信設定  
定時メール：前日の動きと照度のレポートを送信します。  
即時メール：操作があると即時に送信されます。  
不要なメールを選択してください。  
受信者のドメイン制限に注意してください。
- 5. 伝言 語句の登録  
ごはん食べたよ。  
すぐに連絡下さい。  
間違えました。  
●ワンタッチ伝言の語句登録  
画面が崩れるため、できるだけ短い語句をお勧めします。

**オプション設定 \*別途購入が必要です**

- 1. 外出タグ  
○使わない◎使う  
Macアドレス: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88  
●オプション「外出タグ」  
購入したタグの背面に記載しているMacアドレスを登録してください。  
テスト：手で「外出」に切換え、自動的に「在宅」になれば正常受信となります。感度は支障がない限り最大にしてください。

近くで切替 (1m程度)      離れて切替 (10m以上)※推奨

この内容で保存  
●必ず保存してください。