

ASTM  
F2100-19  
LEVEL 2

個包装・使い捨てタイプ

# N95

## 医療用マスク

NIOSH  
米国労働安全衛生管理局  
認証品  
TC-84A-9276 N95

FDA  
米国食品医薬品局  
認証品



NaCl  
捕集効率  
95%以上

PM2.5  
花粉  
黄砂etc.

高密着  
3D構造

装着  
ストレス  
軽減



YICHITA

最新の技術&素材で、装着時の快適性をお約束。

### 高耐久ノーズクリップ

調整可能な特合金ノーズクリップで顔の形に合わせて、マスクの密着性と保護効果を高めて、何度も調整可能な耐久性。



### 効果的快適な濾過素材

新素材によりフィルタ効率が95%以上でありながら、吸入抵抗が指標値の1/3以下なので長時間着用に対応。



### 医療標準試験に合格

EUの医療基準と米国の医療基準に適合し、ASTM F2100-19 Level IIの合成血液の飛散基準を達成。




### 特殊素材の密封 ノーズクッション

空気漏れを防ぎ、鼻当たりが優しく密着性を高め防霧性を向上。



### 視野が広く快適

視野角は基準値60度以上のところ68度設計なので長時間の装着負担を軽減しています。

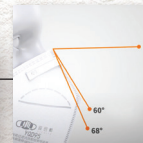

### ストレッチリボン

安全で肌に優しい綿素材で吸水通気も良好、溶着加工で金属不使用なので皮膚アレルギーを起こしにくい。



### 製品仕様

品番	SKR_M_0001
品名	YICHITA YQD95 N95 折り畳み式
製品重量	約5.9g
入数	600枚(25枚入×24箱)/ケース *1枚個包装
箱サイズ	約縦137mm×横250mm×高さ165mm(約340g)
ケースサイズ	約縦440mm×横515mm×高さ520mm(約7.52kg)
使用期限	製造日より5年

### 使用方法 How to



【1】 ノーズピースをつまんで掌で持ち図の要領で紐を垂らして持ってください。【2】 ノーズクリップを上側にしてマスクを顔に当ててください。【3】 ノーズクリップ側の上の紐を頭頂部へ顎側の紐を耳の下へ来る様に留めてください。また、紐がねじれていないか確認してください。【4】 ノーズクリップを鼻に沿う様にフィットさせ空気が漏れない様に必ず両手で調整してください。マスクを着脱ごとに同様に両手で調整してください。両手をマスクの上に乗って呼吸した時に隙間から漏れがないか確認した上でご使用ください。【1】～【4】の要領でマスクを装着し吐いた息が鼻の当たりから漏れている場合は、【4】の装着方法に調整をしてください。マスクの側面からの息が漏れている場合は、【3】の要領で紐がねじれていない事を確認の上、頭に沿って後方に紐を回してください。正しくマスクを装着できない場合は、現場監督者、管理責任者へ相談した上でご使用ください。

24時間  
ご注文  
受付中

オンラインショップにて  
N95医療用マスク販売中!

ショップURL [shop.skyr-jp.com](http://shop.skyr-jp.com)



即納のN95マスク(サンプル品)  
を数量限定で販売中です。

サンプル品を自社在庫にてご用意しております。  
法人・個人様でも会員登録(無料)して頂ければ50枚から購入可能です。お気軽にお買い求めください。  
(サンプル品在庫が無くなり次第受注生産となります。)

**Skyrocket**  
Technology Bank LLC

合同会社スカイロケットテクノロジーバンク

<営業時間> 10:00~16:00

<定休日> 土・日・祝日

✉ [shop@skyr-jp.com](mailto:shop@skyr-jp.com) TEL: 06-6263-3311

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-7-13 トヤマビル本館8F

安心・安全を  
適正価格で!

スカイロケットテクノロジーバンク

# Skyrocket Technology Bank が N95マスク不足を解決します!

N95マスク  
好評販売中!



適正価格で  
安定した生産体制

SKYROCKET

弊社は、マスク専門メーカーの大規模ラインと一体となりオンラインシステムの導入で受注から発注・生産・納品までをワンストップ化を実現。安定した価格と安心の品質を全てのお客様に提供いたします。

取扱商品のYICHITA YQD95マスクだけで月産300万枚の生産枠を確保しております。スポット受注時の納期は1ヶ月程度頂きますが、定期購入契約いただくことで通常より短納期で安定的な供給に尽力致します。企業内での備蓄、ご寄付のご要望にも対応いたします。確実のご指定された医療機関へお届けします。



環境技術バンクが  
厳選商材を販売

BANK

安心してオンラインショップよりご注文ください。コロナ禍における日本のマスク問題解消の一端を担える様に製造販売を関連各社一体となって取り組みます。



安心の米国認証  
N95医療用マスク

TECHNOLOGY

YICHITA N95医療用マスクは、米国公的機関(NIOSH, FDA, ASTM)に認証された高性能医療用マスクです。

NIOSHが定めるN95性能指標基準値を全項目で上回るほど高性能。特に装着時の呼吸の快適さに影響する排気抵抗が1/4、吸気抵抗が1/3となり大幅な負荷軽減されております。視野も基準値より8%広く、フェイスラインを隙間なくやさしく包み込む最新の360° 3D設計など、最新Technologyで利用者の長時間利用を考え負担を最低限に軽減したマスクです。納得の快適性を是非一度ご体感下さい。

環境技術バンクである弊社が厳選した商品を、ビジネスパートナーである(株)日中インターナショナルの工場出荷管理システムとヤマト運輸(株)の受発注システムと決済、高い輸送品質でご提供致します。メーカー直販型の受注生産ですので商品が届かないなどの心配は無用です。



ご注意  
下さい!

## コロナ禍 N95マスクの3つの問題点



取引価格の高騰

コロナ禍において世界的需要、資材の高騰、需要の急増に伴い世界的なN95不足となっております。この影響で一般市場のN95は高額で取引される様になりました。メーカー、商社以外の市場主義的ブローカーによる影響も考えられています。

N95の偽物の流通



「類似品」「相当品」などNIOSHの規格であるN95マスクと同じ素材を使用しただけではN95マスクとはいえません。N95は高い性能指標基準と厳格な製品試験にクリアしたマスクだけが認証されるからこそ医療従事者が安心して使用できるのです。




詐欺業社が横行

衛生商品であるN95は、メーカー供給側の資材確保などによる前払いが原則とされております。また、N95マスクの需要過多により、「詐欺被害」は100億円の大台の乗との報道もあり、偽物や認証の虚偽も問題となっております。

納期  
1ヶ月

## 毎月、前期と後期の2期で受注生産を受付中

決済完了をもってご注文を確定となります。納品までのフローはあくまでも目安となり、工場在庫、生産状況によりお客様へ早くお届けできる場合はフレキシブルに対応いたします。スポット購入は300枚〜、定期購入は600枚/ケース〜購入可能です。定期購入契約を締結させて頂く事で必要な数量を安定的に納品する事ができます。

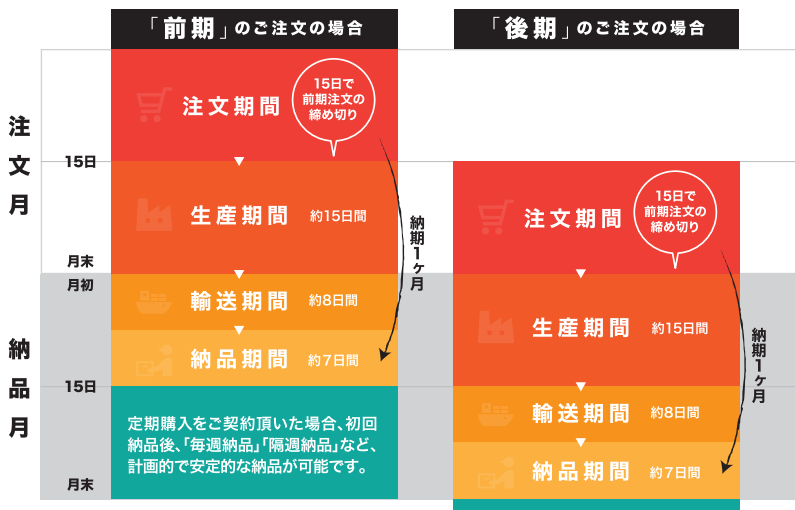

N95だからって安心できない?  
医療用と防塵用があるの?

### 医療用呼吸器防護マスクの条件

※日本には、医療用マスクには規定がない為、米国の基準を参考にしています。

#### N95マスク(防塵)

別名:N95レスピレーター

NIOSH + FDA

コロナ禍のマスク不足ため、米国ではEUA法(市販前緊急許可法)によりFDAの承認されていないN95でも医療施設で使用できるようになりました。

#### 医療用N95マスク

別名:サージカルN95レスピレーター

NIOSH + FDA + ASTM

NIOSH 米国立労働安全衛生研究所  
認証番号: TC-84A-9276

FDA 米国食品医薬品局  
※日本でいう厚生労働省

ASTM F2100-19 Level II  
米国国際標準化規格設定機関

サージカルマスク レベル2認証

医療用N95マスクの基本条件

はねしき飛沫などの液体防護性は医療施設として手洗室でも使用する事ができます。



即納のN95マスク(サンプル品)をオンラインショップにて数量限定で販売中です。

法人・個人様でも会員登録(無料)して頂ければサンプル品を50枚から購入可能です。お気軽のお買い求めください。(サンプル品在庫が無くなり次第受注生産となります。)